

## Stapler EndoWrist

### Adendo do Kit de Liberação do Stapler



**Direitos autorais**

©2021 Intuitive Surgical, Inc. Todos os direitos reservados.

**Marcas registradas**

*Intuitive, Intuitive Surgical, Beyond the Limits of the Human Hand, da Vinci, da Vinci S, da Vinci Si, da Vinci Xi, ProGrasp, HotShears, EndoWrist, EndoPass, ClearField, CardioVac, Vacuum Source, TilePro e InSite* são marcas comerciais ou marcas registradas da Intuitive Surgical, Inc. As marcas comerciais de outras partes são propriedade dos respectivos proprietários e devem ser tratadas como tal.

**Rx only**

## Introdução

Este adendo ao *Manual do Usuário dos Instrumentos e Acessórios do Stapler EndoWrist da Vinci Xi* descreve informações específicas para:


- Uso apropriado do Kit de Liberação do Stapler EndoWrist da Vinci Xi (PN 381395)

Mantenha este adendo com a sua documentação do usuário do sistema da Vinci Xi.

## Descrição Geral

O Kit de Liberação do Stapler ([Figura 1](#)) é destinado ao uso nas situações em que as mandíbulas do Stapler EndoWrist da Vinci Xi não abrem. Abrir as mandíbulas do Stapler usando o Kit de Liberação do Stapler exige girar a ferramenta fornecida em até três orifícios de liberação no instrumento, de acordo com as instruções na etiqueta de instruções integrada do Kit de Liberação do Stapler.

Consulte o *Manual do Usuário dos Instrumentos e Acessórios do Stapler EndoWrist da Vinci Xi* para obter as instruções completas.

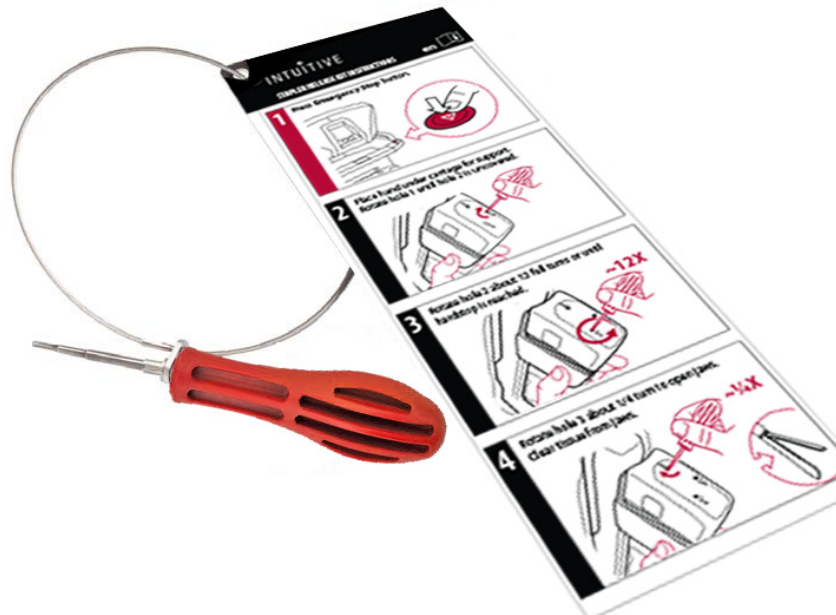

**Figura 1** Kit de liberação do Stapler

### Antes de usar o Kit de Liberação do Stapler

Antes de usar o Kit de Liberação do Stapler, examine o orifício de liberação 2 no invólucro do instrumento. Se o orifício de liberação 2 estiver coberto por um ponto branco (Figura 2) e não estiver acessível, a ferramenta precisa ser girada no orifício de liberação 1 primeiro, em seguida nos orifícios de liberação 2 e 3.



**Figura 2 Orifício de liberação 2 coberto por ponto branco**

Se o orifício de liberação 2 não estiver coberto pelo ponto branco (Figura 3), não será necessário girar a ferramenta no orifício de liberação 1. A tentativa de girar a ferramenta no orifício de liberação 1 poderá resultar em quebra da ferramenta.



**Figura 3 Orifício de liberação 2 não coberto por ponto branco**

## Orientações para usar o Kit de Liberação do Stapler

### Para evitar quebrar a ferramenta do Kit de Liberação do Stapler:

- Siga as instruções apresentadas no *Adendo ao Manual do Usuário dos Instrumentos e Acessórios do Stapler EndoWrist da Vinci Xi*.
- Não continue a girar a ferramenta no orifício de liberação 2 após sentir resistência (até 12 voltas completas).

### Se a ferramenta do Kit de Liberação do Stapler quebrar:

- O orifício de liberação 2 e/ou o orifício de liberação 3 podem ser girados usando a ferramenta incluída no Kit de Liberação do Instrumento Vinci Xi (PN 381321).
- Se a ferramenta tiver quebrado em um orifício de liberação, esse orifício terá sido totalmente girado e não haverá necessidade de mais nenhuma ação com a ferramenta.

-Fim-